

# CombiCarrierII® Hovedfikseringsenhed

## GÆLDENDE RETNINGSLINIER

[www.HartwellMedical.com](http://www.HartwellMedical.com)

*Creating Quality Products for Life*

## INTRODUKTION

Combi Carrier II Hovedfikseringsenhed unikke design tillader basisenheden (Base Plate) permanent fastgørelse til Combi Carrier II således at det samlet kan opbevares i ambulancens opbevaringsrum. Hovedfikseringsenheden er røntgen kompatibel, nem at rengøre og nem at betjene. Denne vejledning er gældende for både CC3400H og CC3400H-BK.

## INDKLUDET I PAKKEN

The CombiCarrierII Hovedfikseringsenhed indeholder følgende:

1 Stk	Base Plate
2 Stk	Støtteblokke
1 Stk	Hovedstrop

## VEJLEDNING

Billederne til højre viser hvordan Hovedfikseringsenheden hurtigt kan fastgøres til CombicarrierII og fikserer patienten.

### **VIGTIGT: Følg altid den gældende lokale fastlagte medicinske vejledning.**

1. Fastgør fikseringsenhedens bundplade til hovedenden af CombicarrierII ved at træde den lange strop gennem de D formede huller i CombicarrierII som vist på billede nr. 1. stropen trædes op gennem hullerne, hen over CombicarrierII og ned gennem det hullet på den anden side og fastgøres herefter til velcroen på bundpladen..
2. Forsiden af CombicarrierII med bundpladen fastgjort.
3. Når patienten er forsvarligt fastgjort, placeres hovedstøtteblokkene på begge sider af patientens hoved, lige over ørerne, helt tæt op ad patientens hoved. Basispladestropen forhindrer ikke hovedblokkene i at holde patientens hoved, når hovedstropen er fastgjort.
4. Patientens hoved fikseres med hovedstropen, ved at begge ender føres ned gennem de D formede huller og fastgøres i velcroen.

1.



2.



3.



4.



# CombiCarrierII® Hovefikseringsenhed

**GÆLDENDE RETNINGSLINIER**

[www.HartwellMedical.com](http://www.HartwellMedical.com)

*Creating Quality Products for Life*

## ORDREINFORMATIONER

### MODEL #

CC 3400H  
CC 3400H-BK

### BESKRIVELSE

CombiCarrierII® Hovedfikseringsenhed  
CombiCarrierII Hovedfikseringsenhed - Sort

### REPLACEMENT PARTS

CC 3400-9-100  
CC 3400-9-200  
CC 3400-9-300  
CC 3400-9-100-BK  
CC 3400-9-200-BK  
CC 3400-9-300-BK

### DESCRIPTION

CombiCarrierII Hovedfikseringsenhed Bundplade (stk)  
CombiCarrierII Hovedfikseringsenhed Støtteblokke (par)  
CombiCarrierII Hovedfikseringsenhed Hovedstrop (stk)  
CombiCarrierII Hovedfikseringsenhed Bundplade - sort (stk)  
CombiCarrierII Hovedfikseringsenhed Støtteblokke - sort (par)  
CombiCarrierII Hovedfikseringsenhed Hovedstrop - sort (stk)

## CUSTOMER SERVICE

Hartwell Medical er kendt for sin gode kundeservice og produktgaranti. Vi leverer høj kvalitet, innovative traumemedicinske produkter og garanter hvert eneste produkt. Såfremt der er nogen spørgsmål omkring brug af CombiCarrierII hovedfikseringsenheden, står vort servicepersonale klar til at hjælpe.

Hvis der opstår nogle alvorlige hændelser i forbindelse med brugen af enheden, ser vi gerne at det straks rapporteres til Hartwell Medical og til den lokale myndighed for medicinsk udstyr.

Kontakt din lokale forhandler for bestilling af reservedele.

Medak ApS  
Ka@medak.dk

## Om os

Hartwell Medical er stolte af, at gennem de sidste 30 år, at have været en højt respekteret producent af innovativt traumemedicinsk udstyr. Gennem de sidste to årtier har vi set en signifikant teknologisk udvikling af traumeudstyrsindustrien og er stolte af at være en vigtig spiller indenfor både research og udviklingen af patientbehandlingsudstyr og teknikker.

Alle vore produkter undergår både kliniske undersøgelser og reelle test for at sikre at produkterne overholder vore høje standarder og kundens skiftende behov. Skulle der opstå nogen spørgsmål om brug og vedligehold af vore produkter, så står vi klar til at hjælpe. Hartwell Medical arbejder hele tiden på af levere kvalitetsprodukter for at sikre liv.

Supplerende information om Hartwell Medical og produkterne kan findes på vores hjemmeside.  
[www.hartwellmedical.com](http://www.hartwellmedical.com)

# HARTWELL MEDICAL



Hartwell Medical LLC  
6354 Corte del Abeto, Suite F  
Carlsbad, CA 92011 USA  
PH: (760) 438-5500 FX: (760) 438-2783  
[www.HartwellMedical.com](http://www.HartwellMedical.com)

AGCCHI 06/21



Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



©2021 Hartwell Medical LLC - All rights reserved