

# CombiCarrierII® Kopffixierung

## Gebrauchsanweisung

www.HartwellMedical.com

Creating Quality Products for Life

### EINFÜHRUNG

Das einzigartige Design der CombiCarrierII®Kopffixierung ermöglicht es, die Grundplatte am CombiCarrierII zu befestigen und im Aufbewahrungsfach des Krankenwagens auf dem Gerät zu belassen. Die Kopffixierung ist röntgenkompatibel, leicht zu reinigen, kompakt und einfach zu bedienen! Diese Anweisungen gelten sowohl für den CC 3400H als auch für den CC 3400H-BK.

### IM PAKET ENTHALTEN

Die CombiCarrierII Kopffixierung besteht aus Folgendem:

- 1 Grundplatte
- 2 Fixierblöcke
- 1 Stirngurt

### ANWENDUNG SINSTRUKTIONEN

Die Fotos rechts zeigen, wie die Kopffixierung einfach am CombiCarrierII befestigt und zur Sicherung eines Patienten verwendet werden kann.

**WICHTIG: Befolgen Sie immer die von Ihrem medizinischen Direktor festgelegten lokalen medizinischen Protokolle.**

1. Befestigen Sie die Grundplatte der Kopffixierung am Kopf des CombiCarrierII, indem Sie den langen Gurt durch die D-förmigen Löcher des CombiCarrierII führen, wie in Foto 1 gezeigt. Der Gurt wird durch das Loch über die Oberseite von geführt den CombiCarrierII durch das Loch auf der anderen Seite nach unten und dann am Schlaufenmaterial oben auf der Grundplatte befestigen.
2. Vorderseite des CombiCarrierII mit angebrachter Grundplatte.
3. Sobald der Körper des Patienten ordnungsgemäß gesichert wurde, platzieren Sie die Kopffixierblöcke auf beiden Seiten des Kopfes des Patienten direkt über den Ohren, und achten Sie darauf, dass die Blöcke genau am Kopf des Patienten anliegen. Das Ende des Grundplattenriemens behindert nicht das Festhalten des Kopffixierblöcke, sobald der Stirngurt angebracht ist.
4. Befestigen Sie den Kopf des Patienten mit dem Stirngurt, indem Sie jedes Ende durch die D-Ringe auf beiden Seiten der Grundplatte führen und den Gurt mit dem Klettmaterial an beiden Enden des Gurtes befestigen.

1.



2.



3.



4.



# CombiCarrierII® Kopffixierung

**Gebrauchsanweisung**

[www.HartwellMedical.com](http://www.HartwellMedical.com)

*Creating Quality Products for Life*

## BESTELLINFORMATIONEN

### MODELL #

CC 3400H  
CC 3400H-BK

### BESCHREIBUNG

CombiCarrierII® Kopffixierung  
CombiCarrierII Kopffixierung - Schwarz

### ERSATZ PARTS

CC 3400-9-100  
CC 3400-9-200  
CC 3400-9-300  
CC 3400-9-100-BK  
CC 3400-9-200-BK  
CC 3400-9-300-BK

### BESCHREIBUNG

CombiCarrierII Grundplatte Kopffixierung (Stück)  
CombiCarrierII Fixierblöcke Kopffixierung (Paar)  
CombiCarrierII Stirngurt Kopffixierung (Stück)  
CombiCarrierII Grundplatte Kopffixierung - Schwarz (Stück)  
CombiCarrierII Fixierblöcke Kopffixierung - Schwarz (Paar)  
CombiCarrierII Stirngurt Kopffixierung - Schwarz (Stück)

## KUNDENDIENST

Hartwell Medical ist bekannt für sein hervorragendes Kundenservice- und Garantieprogramm. Wir liefern hochwertige, innovative Notfallprodukte und stehen hinter jedem. Sollten Sie Fragen zur Verwendung oder Pflege der CombiCarrierII® Kopffixierung haben, hilft Ihnen unser Kundendienst gerne weiter.

Wenn Sie Kenntnis von einem schwerwiegenden Vorfall im Zusammenhang mit der Verwendung des Geräts erhalten, sollten Sie den Vorfall Hartwell Medical und Ihrer örtlichen Aufsichtsbehörde für Medizinprodukte melden.

Bitte bewahren Sie dieses Blatt als Referenz auf, falls Sie in Zukunft weitere Produkte oder Ersatzteile bestellen müssen. Diese Informationen unterstützen unsere Kundendienstabteilung bei der Beschaffung der richtigen Teile für Sie.

### **Kundendienstzeiten:**

Montag - Freitag  
8:00 am - 4:30 pm, PST  
[customerservice@hartwellmedical.com](mailto:customerservice@hartwellmedical.com)

## ÜBER UNS

Hartwell Medical ist stolz darauf, seit mehr als 30 Jahren als angesehener Hersteller innovativer medizinischer Notfallprodukte im Geschäft zu sein. In den letzten drei Jahrzehnten haben wir bedeutende technologische Fortschritte in der Notfallversorgung erzielt und sind stolz darauf, eine Schlüsselrolle bei der Forschung und Entwicklung verbesserter Geräte und Techniken für die Patientenversorgung gespielt zu haben.

Alle unsere+ Produkte werden einer klinischen Bewertung und praktischen Feldtests unterzogen, um sicherzustellen, dass sie unseren hohen Standards und Ihren sich ständig ändernden Anforderungen entsprechen. Sollten Sie Fragen zur Verwendung oder Pflege unserer Produkte haben, helfen wir Ihnen gerne weiter. Hartwell Medical arbeitet kontinuierlich daran, Ihnen qualitativ hochwertige Produkte fürs Leben anzubieten.

Weitere Informationen zu Hartwell Medical und den von uns angebotenen Produkten finden Sie immer auf unserer Website.

# HARTWELL MEDICAL



**Hartwell Medical**  
6354 Corte del Abeto, Suite F  
Carlsbad, CA 92011 USA  
PH: (760) 438-5500 FX: (760) 438-2783  
[www.HartwellMedical.com](http://www.HartwellMedical.com)

Imported by:  
servoprax GmbH  
Am Marienbusch 9  
46468 Wesel  
Germany

MedEnvoy Global B.V  
Prinses Margrietplantsoen 33  
Suite 123  
2595 AM The Hague  
The Netherlands



AGCCHI 4/24