

CombiCarrierII® Kopffixierung

Gebrauchsanweisung

www.HartwellMedical.com

Creating Quality Products for Life

EINFÜHRUNG

Das einzigartige Design der CombiCarrierII®Kopffixierung ermöglicht es, die Grundplatte am CombiCarrierII zu befestigen und im Aufbewahrungsfach des Krankenwagens auf dem Gerät zu belassen. Die Kopffixierung ist röntgenkompatibel, leicht zu reinigen, kompakt und einfach zu bedienen! Diese Anweisungen gelten sowohl für den CC 3400H als auch für den CC 3400H-BK.

IM PAKET ENTHALTEN

Die CombiCarrierII Kopffixierung besteht aus Folgendem:

- 1 Grundplatte
- 2 Fixierblöcke
- 1 Stirngurt

ANWENDUNG SINSTRUKTIONEN

Die Fotos rechts zeigen, wie die Kopffixierung einfach am CombiCarrierII befestigt und zur Sicherung eines Patienten verwendet werden kann.

WICHTIG: Befolgen Sie immer die von Ihrem medizinischen Direktor festgelegten lokalen medizinischen Protokolle.

1. Befestigen Sie die Grundplatte der Kopffixierung am Kopf des CombiCarrierII, indem Sie den langen Gurt durch die D-förmigen Löcher des CombiCarrierII führen, wie in Foto 1 gezeigt. Der Gurt wird durch das Loch über die Oberseite von geführt den CombiCarrierII durch das Loch auf der anderen Seite nach unten und dann am Schlaufenmaterial oben auf der Grundplatte befestigen.
2. Vorderseite des CombiCarrierII mit angebrachter Grundplatte.
3. Sobald der Körper des Patienten ordnungsgemäß gesichert wurde, platzieren Sie die Kopffixierblöcke auf beiden Seiten des Kopfes des Patienten direkt über den Ohren, und achten Sie darauf, dass die Blöcke genau am Kopf des Patienten anliegen. Das Ende des Grundplattenriemens behindert nicht das Festhalten des Kopffixierblöcke, sobald der Stirngurt angebracht ist.
4. Befestigen Sie den Kopf des Patienten mit dem Stirngurt, indem Sie jedes Ende durch die D-Ringe auf beiden Seiten der Grundplatte führen und den Gurt mit dem Klettmaterial an beiden Enden des Gurtes befestigen.

1.



2.



3.



4.



