

# CombiCarrierII® Huvudfixeringsanordning

## ANVÄNDNINGSDRIFTLINJER

[www.HartwellMedical.com](http://www.HartwellMedical.com)

Skapar kvalitetsprodukter för livet

### INTRODUKTION

Den unika designen av CombiCarrierII® Huvudfixeringsanordning gör det möjligt att fästa Basplattan på CombiCarrierII och lämna den på enheten i ambulansens förvaringsutrymme. Huvudfixeringsanordningen är röntgenkompatibel, lätt att rengöra, kompakt och enkel att använda! Dessa instruktioner gäller både CC 3400H och CC 3400H-BK.

### INKLUDERAT I FÖRPACKNINGEN

CombiCarrierII Huvudfixeringsanordning består av följande

- 1 st Basplatta
- 2 st Stödblock
- 1 st Huvudrem

### ANVÄNDNINGSDRIFTLINJER

Bilderna till höger visar hur Huvudfixeringsanordningen enkelt fästs på CombiCarrierII och används för att säkra en patient.

**VIKTIGT: Följ alltid dina lokala medicinska protokoll som fastställts av din medicinska chef.**

1. Fäst fixeringsanordningens basplatta på CombiCarrierII:s huvud genom att trä den långa remmen genom CombiCarrierII:s D-formade hål, som visas på foto 1. Remmen träs upp genom hålet, över den övre ytan av CombiCarrierII, tillbaka ner genom hålet på andra sidan och fästs sedan i kardborrematerialet på toppen av Basplattan
2. Framsidan av CombiCarrierII med Basplatta fäst.
3. När patientens kropp har säkrats ordentligt, placera Stödblocken på båda sidor av patientens huvud, precis ovanför öronen, och se till att blocken sitter tätt mot patientens huvud. Basplattans remände kommer inte att hindra fastsättningen av Stödblocket när Huvudremmen är på plats.
4. Säkra patientens huvud med Huvudremmen genom att föra varje ände genom D-ringarna på vardera sidan av Basplattan och fästa remmen med kardborrematerialet på båda ändarna av remmen.

1.



2.



3.



4.



# CombiCarrierII® Huvudfixeringsanordning

## ANVÄNDNINGSDRIFTLINJER

[www.HartwellMedical.com](http://www.HartwellMedical.com)

SSkapar kvalitetsprodukter för livet

### BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

#### MODELL #

CC 3400H  
CC 3400H-BK

#### BESKRIVNING

CombiCarrierII® Huvudfixeringsanordning  
CombiCarrierII Huvudfixeringsanordning - Svart

#### RESERVDELAR

CC 3400-9-100  
CC 3400-9-200  
CC 3400-9-300  
CC 3400-9-100-BK  
CC 3400-9-200-BK  
CC 3400-9-300-BK

#### BESKRIVNING

CombiCarrierII Huvudfixeringsanordning Basplatta (styck)  
CombiCarrierII Huvudfixeringsanordning Stödblock (par)  
CombiCarrierII Huvudfixeringsanordning Huvudrem (styck)  
CombiCarrierII Huvudfixeringsanordning Basplatta - Svart (styck)  
CombiCarrierII Huvudfixeringsanordning Stödblock - Svart (par)  
CombiCarrierII Huvudfixeringsanordning Huvudrem - Svart (styck)

### KUNDSERVICE

Hartwell Medical är känt för sin enastående kundservice och garantiprogram. Vi levererar högkvalitativa, innovativa akuta medicinska produkter och står bakom var och en. Om du har några frågor om användning eller skötsel av CombiCarrierII® Huvudfixeringsanordning, hjälper vår kundservicepersonal dig gärna.

Om du blir medveten om någon allvarlig incident relaterad till användningen av enheten, bör du rapportera incidenten till Hartwell Medical och till din lokala medicintekniska tillsynsmyndighet.

Behåll detta blad för referens om du behöver beställa fler produkter eller reservdelar i framtiden. Denna information kommer att hjälpa vår kundserviceavdelning att få rätt delar till dig.

#### **Kundservice öppettider:**

Måndag - Fredag  
7:30 - 16:30, PST

[customerservice@hartwellmedical.com](mailto:customerservice@hartwellmedical.com)

### OM OSS

Hartwell Medical är stolt över att ha varit verksam i mer än 35 år som en högt respekterad tillverkare av innovativa akutmedicinska produkter. Under de senaste två decennierna har vi sett betydande teknologiska framsteg inom akutsjukvårdsindustrin och är stolta över att ha spelat en nyckelroll i forskning och utveckling av förbättrad patientvårdsutrustning och tekniker.

Alla våra produkter genomgår klinisk utvärdering och verkliga fälttester för att säkerställa att de uppfyller våra höga standarder och dina ständigt föränderliga behov. Om du har några frågor om användning eller skötsel av våra produkter, hjälper vi dig gärna. Hartwell Medical arbetar kontinuerligt för att förse dig med kvalitetsprodukter för livet.

Ytterligare information om Hartwell Medical och de produkter vi erbjuder finns alltid tillgänglig på vår webbplats.



MedEnvoy Switzerland  
Gotthardstrasse 28, 6302 Zug,  
Switzerland



MedEnvoy Global B.V  
Prinses Margrietplantsoen 33  
Suite 123  
2595 AM The Hague  
The Netherlands

## HARTWELL MEDICAL



Tri-Tech Forensics, Inc. dba Hartwell Medical  
3811 International Blvd NE, Suite 100  
Leland, NC 28451, United States  
TEL. : (760) 438-5500  
[www.HartwellMedical.com](http://www.HartwellMedical.com)

MAN-AGHI-001SV