

# Inmovilizador de cabeza CombiCarrierII®

## DIRECTRICES DE APLICACIÓN

www.HartwellMedical.com

Creating Quality Products for Life

### INTRODUCCIÓN

El diseño único del inmovilizador de cabeza CombiCarrierII® permite fijar la placa base al CombiCarrierII y dejarla en el dispositivo en el compartimento de almacenamiento de la ambulancia. El inmovilizador de cabeza es compatible con rayos X, se limpia fácilmente, es compacto y fácil de usar. Estas instrucciones son aplicables tanto al CC 3400H como al CC 3400H-BK.

### INCLUIDO EN EL PAQUETE

El inmovilizador de cabeza CombiCarrierII consta de lo siguiente:

- 1 Cada placa base
- 2 Cada uno de los bloques de soporte
- 1 Cada correa para la cabeza

### INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Las fotografías de la derecha muestran cómo el inmovilizador de cabeza se fija fácilmente al CombiCarrierII y se utiliza para asegurar a un paciente.

**IMPORTANTE: Siga siempre los protocolos médicos locales establecidos por su director médico.**

1. Fije la placa base del inmovilizador a la cabeza del CombiCarrierII pasando la correa larga a través de los orificios en forma de "D" del CombiCarrierII como se muestra en la foto 1. La correa se enrosca a través del orificio, a través de la cara superior de CombiCarrierII, vuelva a bajar a través del orificio del otro lado y luego se fija al material de bucle en la parte superior de la placa base.
2. Parte delantera del CombiCarrierII con la placa base colocada.
3. Una vez que el cuerpo del paciente se haya asegurado correctamente, coloque los bloques de soporte de la cabeza a ambos lados de la cabeza del paciente, justo por encima de las orejas, asegurándose de que los bloques encajen perfectamente contra la cabeza del paciente. El extremo de la correa de la placa base no obstaculizará la retención del bloque de soporte para la cabeza una vez que la correa para la cabeza esté en su lugar.
4. Asegure la cabeza del paciente con la correa para la cabeza, pasando cada extremo a través de los anillos en D a cada lado de la placa base y asegurando la correa con el material de gancho y bucle en ambos extremos de la correa.

1.



2.



3.



4.



# Inmovilizador de cabeza CombiCarrierII®

**DIRECTRICES DE APLICACIÓN**

[www.HartwellMedical.com](http://www.HartwellMedical.com)  
Creating Quality Products for Life

## DE LA INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

### MODELO #

CC 3400H  
CC 3400H-BK

### DESCRIPCIÓN

Inmovilizador de cabeza CombiCarrierII®  
Inmovilizador de cabeza CombiCarrierII - Negro

### REPLACEMENT PARTS

CC 3400-9-100  
CC 3400-9-200  
CC 3400-9-300  
CC 3400-9-100-BK  
CC 3400-9-200-BK  
CC 3400-9-300-BK

### DESCRIPTION

Placa base del inmovilizador de cabeza CombiCarrierII (cada uno)  
Bloque de soporte de la cabeza del inmovilizador de cabeza CombiCarrierII (par)  
Correa para la cabeza del inmovilizador de cabeza CombiCarrierII (cada uno)  
Placa base del inmovilizador de cabeza CombiCarrierII - Negro (cada uno)  
Bloque de soporte de la cabeza del inmovilizador de cabeza CombiCarrierII - Negro (par)  
Correa para la cabeza del inmovilizador de cabeza CombiCarrierII - Negro (cada uno)

## SERVICIO AL CLIENTE

Hartwell Medical es conocido por su excelente servicio al cliente y su programa de garantía. Entregamos productos médicos de emergencia innovadores y de alta calidad y respaldamos cada uno de ellos. Si tiene alguna pregunta sobre el uso o cuidado del inmovilizador de cabeza CombiCarrierII®, nuestro personal de servicio al cliente estará encantado de ayudarle.

Si tiene conocimiento de algún incidente grave relacionado con el uso del dispositivo, debe informar el incidente a Hartwell Medical y a la autoridad reguladora local de dispositivos médicos.

Conserve esta hoja como referencia en caso de que necesite pedir más productos o piezas de repuesto en el futuro. Esta información ayudará a nuestro departamento de servicio al cliente a obtener las piezas adecuadas para usted.

### Horario de atención al cliente:

Lunes - Viernes  
De 7:30 am a 4:30 pm, PST  
[customerservice@hartwellmedical.com](mailto:customerservice@hartwellmedical.com)

## SOBRE NOSOTROS

Hartwell Medical se enorgullece de llevar más de 35 años en el sector como fabricante muy respetado de innovadores productos médicos de emergencia. Durante las últimas tres décadas, hemos visto avances tecnológicos significativos en la industria de la atención de emergencia y estamos orgullosos de haber desempeñado un papel clave en la investigación y el desarrollo de mejores técnicas y equipos de atención al paciente.

Todos nuestros productos están sujetos a evaluación clínica y pruebas de campo de la vida real para garantizar que cumplen con nuestros altos estándares y sus necesidades en constante cambio. Si tiene alguna pregunta sobre el uso o cuidado de nuestros productos, estaremos encantados de ayudarle. Hartwell Medical trabaja continuamente para brindarle productos de calidad de por vida.

En nuestro sitio web siempre encontrará información adicional sobre Hartwell Medical y los productos que ofrecemos.

# HARTWELL MEDICAL



Tri-Tech Forensics, Inc. dba Hartwell Medical  
3811 International Blvd NE, Suite 100  
Leland, NC 28451, United States  
TEL. : (760) 438-5500  
[www.HartwellMedical.com](http://www.HartwellMedical.com)



MedEnvoy Switzerland  
Gothardstrasse 28, 6302 Zug,  
Switzerland

MedEnvoy Global B.V  
Prinses Margrietplantsoen 33  
Suite 123  
2595 AM The Hague  
The Netherlands

MAN-AGHI-001ES

©2025 Hartwell Medical - Todos los derechos reservados